

**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ (С ПОДГОЛОВНИКОМ) КФ0-01- «МСК»(МСК-101)  
 КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ КФ2-01-«МСК» (МСК-102)  
 КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ СО СЪЕМНЫМИ БОКОВЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ КФ3-01-«МСК» (МСК-103)  
 ТУ 9452-001-52962725-01**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1. Кровати медицинские (далее по тексту — кровати) предназначены для лечебно-профилактических учреждений .
- 1.2. Кровати изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10° С до +35° С и относительной влажности 80% при температуре +25° С .

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Основные параметры и размеры.
- 2.1.1. Основные параметры и размеры кроватей указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров		
	КФ0-01-«МСК» (МСК-101)	КФ2-01-«МСК» (МСК-102)	КФ3-01-«МСК» (МСК-103)
1. Габаритные размеры, не более, мм, ± 10 мм	2125x975x900	2125x975x900	2125x975x900
2. Количество секций	2	3	4
3. Количество регулируемых секций	1	2	3
4. Габаритные размеры подматражной рамы (длина x ширина) , мм , ± 10 мм	2000x850	2000x850	2000x850
5. Высота до рамы, не более, мм, ± 10 мм	525	525	525
6. Габаритные размеры секций, мм, ± 10 мм:			
- спиной(подголовника)	720	720	720
- тазовой	-	150	150
- бедренной	-	-	420
- ножной	-	-	550
- тазобедренной	1150	1010	-
7. Углы наклона секций относительно горизонтальной поверхности, град, не менее:			
- спиной(подголовника)	0 – 45	0 – 45	0 – 45
- бедренной	-	-	0 – 30
- ножной	-	-	0 – 30
- тазобедренной	-	0 – 30	-
8. Масса, кг, не более	45	45	45

**2.2. Характеристики:**

- 2.2.1. Кровать выдерживает равномерно распределенную по ложу нагрузку массой не более 200 кг .
- 2.2.2. Кровать установлена на четыре колесные опоры диаметром 100 мм, вращающиеся вокруг вертикальной оси. Два колеса оснащены тормозом.
- 2.2.3. Усилие, необходимое для включения тормоза колес не более 150 Н (15 кг).
- 2.2.4. Усилие перемещения кроватей с номинальной нагрузкой не более 200Н (20 кг), при этом колеса должны быть сориентированы в направлении движения. .
- 2.2.5. Усилие, прилагаемое к рукояткам механизмов для изменения углов наклона секций ложа с номинальной нагрузкой не более 150 Н (15 кг) .
- 2.2.6. Кровать стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одним из колес не более 3 мм.
- 2.2.7. Все металлические детали кровати имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
- 2.2.8. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.
- 2.2.9. Поверхность кровати устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки кровати соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	шт.	Наименование	шт.	Наименование	шт.	Наименование	шт.
подматражная рама	1	болт мебельный М8x70	8	болт М10x45	4	Штанга двухопорная(Рама Балканского)*	1
ножка	2	шайба 8 пружинная	8	шайба10 увеличенная	4	Подставка для судна*	1
колесо (из них 2 с тормозом)	4	гайка М8	8	Ограждения боковые*	1	Матрац с чехлом*	1
спинка	2	винт М10x25	4	Штатив медицинский для вливаний*	1		
отбойник ПВХ	4	шайба10 пружинная	4	Штанга для подвески ручных опор*	1		

\* - комплектуется по согласованию с заказчиком.

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Все модели кроватей изготавливаются из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции и состоят из следующих узлов: подматражной рамы, ножек, спиннок.
  - 4.2. Ножки имеют 4 колеса, вращающихся вокруг вертикальной оси. Два колеса оснащены индивидуальными тормозом.
  - 4.3. Кровать имеет по углам четыре отбойника.
  - 4.4. Кровати, в зависимости от модели, имеют одну, две или три регулируемые секции, позволяющие придать телу больного наиболее удобное положение. Все манипуляции с секциями производятся вручную.
- 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**
- 5.1. К эксплуатации кроватей допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию кроватей.
  - 5.2. При подъеме и опускании секций необходимо пользоваться специальными ручками, установленными с двух сторон на каждой секции. Следите за тем, чтобы пальцы рук не попали между рамой и секцией. Рекомендуем производить подъем и опускание секций кроватей двум медработникам, по одному с каждой стороны.
  - 5.4. Перемещение кровати производить только с отключенным тормозом колес. Перемещение кровати с включенным тормозом колес приводит к их самопроизвольному отворачиванию и неизбежной поломке ступицы.

**6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- 6.1. После транспортирования кровати в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать ее при комнатной температуре не менее 2–х часов.
  - 6.2. Распакуйте кровать. Проверьте комплектность.
  - 6.3. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).
- 7. ПОРЯДОК СБОРКИ**
- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
  - 7.2. Прикрепить колеса (4 шт.) винтами М10x25 к ножкам кровати. Под головку винта подложить шайбу 10 пружинную. В случае затруднения установив винтов в колеса необходимо открутить ось вращения ролика колеса и удалить его. После крепления вилки колеса установить ролик в обратном порядке. Рекомендуем колеса с тормозом (2 шт.) разместить диагонально.
  - 7.3. Привернуть ножки с колесами к раме при помощи болтов мебельных М8x70, гаек М8 и шайб 8 пружинных.
  - 7.4. Вставить спинки в раму.
  - 7.5. Привернуть отбойники к спинкам болтами М 10x45. Под головку болта подложить шайбу 10 увеличенную.
  - 7.6. Перед началом эксплуатации проверить надежность крепления всех узлов кровати, затяжку всех резьбовых соединений, работоспособность подъемных секций . Установить кровать на место, проверить действие тормоза на колесах .

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 8.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кровати, проверку исправности подъемных механизмов, надежности крепления колес, а также при необходимости смазку подвижных соединений.
- 8.2. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их гаечным ключом.

**9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 9.1 Кровати в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.
  - 9.2 Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.
- 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**
- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.
  - 10.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
  - 10.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
  - 10.4 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Кровать медицинская \_\_\_\_\_  
наименование и тип изделия

Дата выпуска \_\_\_\_\_ М.П.  
 Соответствует ТУ 9452-001-52962725-01 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_ (Хабидуллин Р.Р)

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока  
 Изделие медицинской техники \_\_\_\_\_  
наименование и тип изделия

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
номер ГОСТ или ТУ

Приобретен \_\_\_\_\_  
дата, подпись, штамп торгующей организации

## Инструкция по сборке кровати медицинской

1. Прикрепить колеса к ножкам при помощи винтов М10х25 и шайб 10 пружинных.

В случае затруднения установки винтов в колеса необходимо открутить ось вращения ролика колеса и удалить его. После крепления вилки колеса установить ролик в обратном порядке.

Для более надежной фиксации резьбы рекомендуем винты посадить на краску.

2. Прикрепить ножки к раме при помощи болтов М8х70, гаек М8 и шайб 8 пружинных.

3. Вставить обе спинки в раму.

4. Прикрепить отбойники при помощи болтов М10х45 и шайб 10 увеличенных.

